

Letti da degenza elettrici smontabili a tre snodi con ruote LE1 – LE2

Istruzioni d'uso e manutenzione



questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.

Termigea s.r.l.

Sede: Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI)
TEL. +39 050 878741 - FAX +39 050 878742 – info@termigea.it



Importante



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza. Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente a **Termigea s.r.l.**

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto **Termigea®**

| | |
|---|-----------|
| 1. AVVISI PER LA SICUREZZA | 3 |
| 2. DESTINAZIONE PREVISTA | 3 |
| 3. SCHEDA TECNICA | 3 |
| 4. ETICHETTATURA | 4 |
| 5. INSTALLAZIONE ED USO | 4 |
| 6. PULIZIA E MANUTENZIONE | 8 |
| 7. DEPOSITO | 9 |
| 8. SMALTIMENTO | 9 |
| 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL DISPOSITIVO MEDICO | 10 |
| 10. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA | 11 |
| 11. MODULO DI RESO | 12 |

1. Avvisi per la sicurezza

- ☞ Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto.
- ☞ Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.
- ☞ Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- ☞ Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avviate immediatamente il Vs. rivenditore.

2. Destinazione prevista

I letti **Termigea s.r.l.** sono Dispositivi Medici destinati a pazienti lungodegenti.

Termigea s.r.l. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

Il piano rete è suddiviso in 4 sezioni: uno schienale mobile, un elemento centrale fisso, un appoggia-gambe e un alza-ginocchia mobili. Lo schienale e l'appoggia-gambe sono regolabili grazie a motori elettrici. Il piano rete può essere regolato orizzontalmente in altezza oppure regolato fino alla posizione più bassa. Tutte le regolazioni vengono eseguite tramite apposita pulsantiera.

Per proteggere il paziente da eventuali cadute accidentali dal letto, il letto dispone di sponde su entrambi i lati, che possono fungere da barriera o essere abbassate in caso di mancato utilizzo.

3. Scheda Tecnica

Letto da degenza elettrico a tre snodi elevabile con trendelemburg

Letto a 3 snodi a movimentazione elettrica, con poggiatesta inclinabile fino a 75° e poggiapiedi inclinabile fino a 40°. Piano a doghe in legno. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su quattro ruote piroettanti da mm 125 di diametro, tutte con freno. La movimentazione verticale del piano è compresa tra circa 20/40 cm. di altezza minima e 76/80 cm. di altezza massima, a seconda del modello. Questa versione offre la possibilità di movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due spintori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Il sostegno per alzarsi dal letto è compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno.

Dimensioni esterne: cm. 212x102x89/130 altezza (**LE1**) - cm. 212x102x69/125 altezza (**LE2**).

Dimensioni rete: cm. 191x80x40/80 altezza da terra a sotto la rete (**LE1**) - cm. 191x80x20/76 altezza da terra a sotto la rete (**LE2**).

Peso: kg. 80 (**LE1**) - kg. 81 (**LE2**)

Peso massimo sopportato: kg. 170 - La portata massima dell'alza-malati è 70 kg nella sua estremità anteriore.

Accessori a richiesta

- **LE1/1 - Tavolino per letto da degenza in legno**

Tavolino in materiale plastico ad alta resilienza studiato specificamente per i letti da degenza in legno, sistema d'incastro ad elastico agganciato direttamente sulle sponde in legno.

Dimensioni esterne: cm. 88x35

Dimensioni piano d'appoggio: cm. 69x32

4. Etichettatura



5. Installazione ed uso

5.1 Installazione - Istruzioni per il montaggio dei letti.



1. Il letto viene fornito smontato, installato su un dispositivo di trasporto. Può essere trasportato anche in appartamenti. E' composto da due estremità (testata e pediera), da un piano rete diviso al centro; quattro sponde laterali e un alza-malati con maniglia triangolare. Il letto poggia su quattro rotelle orientabili, tutte provviste di freno di blocco.
2. Poiché il letto pesa più di 25 kg, deve essere trasportato prima del montaggio da almeno due persone.
3. Prima di procedere all'assemblaggio assicurarsi di avere spazio a sufficienza. Procedere al montaggio in almeno due persone.
4. Aprire l'imballo. Le componenti pre-assemblate del letto sono fissate al bancale dell'imballo tramite una struttura di metallo. Rimuovere i dadi di fissaggio a farfallina per togliere la struttura e liberare le componenti del letto.
5. Montare la struttura della superficie di degenza inserendo i profili come da foto e facendo attenzione alle mani nel momento di avvicinamento delle parti.



6. Inserire e serrare i pomelli in dotazione per rendere stabile la struttura della superficie di degenza.



7. Inserire un cacciavite nella fessura di sbloccaggio della centralina e tirare il coperchio per rimuoverlo ed accedere all'allaccio dei motori. Togliere le fascette dai cavi. Collegare il motore per l'alzata dei piedi come in figura.



8. Avvicinare la testata del letto alla superficie di degenza, controllare che il fermo di bloccaggio sulla testata sia aperto (come in figura), sollevare la struttura della superficie di degenza per farla entrare nelle apposite asole di fissaggio. Arrivate a battuta chiudere il fermo di bloccaggio.



9. Collegare alla centralina, in ordine, il motore per l'alzata della testata lato testa e il motore per l'alzata della testata lato piedi. Posizionare i cavi nelle apposite sedi facendo attenzione che non interferiscano con la chiusura del coperchio. Posizionare i cavi in modo che non interferiscano con i movimenti del letto (Assicuratevi che nessun cavo venga danneggiato, che non si formino nodi e che i cavi non si impiglino nelle parti mobili).



10. Collegare l'alimentazione della corrente e provare la correttezza dei collegamenti con i movimenti del letto attraverso il telecomando in dotazione.
11. Riposizionare e chiudere il coperchio.
12. Montare le maniglie per l'alzata manuale della superficie di degenza con la ferramenta in dotazione




e posizionare le doghe che risultano ancora non posizionate partendo dalle doppiodoghe con regolazione .

13. Sollevare il letto attraverso il comando per le due testate al fine di facilitare l'inserimento delle sponde. Posizionare vicine una coppia di sponde, inserire le guide nei fori delle sponde e inserire la guida in una delle due testate. Ripetere l'operazione per l'altra testata ed infine entrambe le operazioni per le sponde dell'altro lato.



14. Inserire l'asta sollevamalati in uno dei due alloggiamenti nel lato testa come da figura. Il perno di metallo deve trovarsi nell'intercapedine del raccordo.

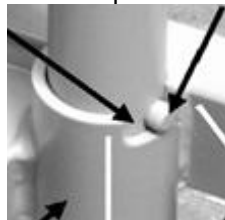

Posate il cavo di alimentazione in modo tale che durante il funzionamento del letto non venga trascinato via, calpestato o danneggiato da parti mobili. Prima di ogni trasporto togliete la spina dalla presa e inserite il cavo di alimentazione nel portacavo in modo che il cavo non possa cadere e toccare il pavimento.

Non posizionare il letto in modo tale che interferisca con vie di transito

5.2 Avvertenza d'uso



Prima del primo utilizzo pulite e disinfettate il letto di cura. L'utilizzatore dovrà verificare l'efficienza e il buono stato del letto, e dovrà rispettare quanto indicato nel manuale d'uso. Lo stesso vale per gli accessori.

Il presente manuale d'uso contiene avvertenze sulla sicurezza assolutamente da rispettare. Tutti gli utilizzatori, che lavorano con il letto di cura, devono conoscere il contenuto di questo manuale e rispettare le avvertenze sulla sicurezza.

Prima del primo utilizzo informate l'utilizzatore sull'utilizzo sicuro del letto sulla base di questo manuale d'uso che deve essere fornito insieme al letto.

Fate particolare attenzione all'utilizzo di azionamenti elettrici e delle sponde.

- Assicuratevi che in caso di regolazioni non vi siano ostacoli come mobili o inclinazioni del soffitto.
- Quando si abbassa l'alzatesta o l'alzagambe verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro sotto la rete: rischio di schiacciamento.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Adagiare il paziente sul letto solo dopo aver dotato il letto di un materasso idoneo.
- Non utilizzare materassi rigidi (si consiglia l'uso di materassi per letti snodati).
- Ricordarsi di bloccare le ruote durante la movimentazione del paziente dal letto.
- Vietato l'uso in ambienti aperti.
- Controllate il cavo di alimentazione regolarmente verificando eventuali danni meccanici (abrasioni, fili scoperti, piegature, ammaccature, ecc.) e in particolare:
 - ☞ Dopo ogni sovraccarico meccanico (per es.: schiacciamento del cavo con il letto di cura stesso, con carrello degli attrezzi, dopo forti sforzi di trazione e di flessione come rulli di scorrimento del letto di cura con cavo di alimentazione inserito);
 - ☞ Dopo ogni cambio di posizione/ spostamento prima di inserire la spina;
 - ☞ Durante il funzionamento regolarmente da parte dell'utilizzatore.
- Controllate che il dispositivo antitrazione del cavo di alimentazione sia serrato correttamente.
- Non utilizzate lo spazio libero sotto al letto per depositare eventuali utensili.
- Posizionate la superficie di degenza nella posizione più bassa, quando lasciate il letto di cura incustodito al paziente. In questo modo il pericolo di lesione del paziente a causa di caduta durante la salita e la discesa dal letto viene ridotto al minimo.
- In caso di mancato utilizzo fate in modo che la pulsantiera non possa cadere inavvertitamente (deve rimanere attaccata al gancio). Assicuratevi che il cavo non possa essere danneggiato da parti mobili del letto di cura.
- Portate la pulsantiera al di fuori della portata del paziente e in particolare dei bambini per proteggerli da eventuali movimenti motorizzati indesiderati (per es. pediera), se:
 - ☞ Il paziente non è in grado di utilizzare in modo sicuro il letto e di liberarsi da posizioni pericolose;
 - ☞ Il paziente può essere messo in pericolo a causa di un movimento involontario dei motori elettrici;
 - ☞ Sono applicate le sponde (pericolo di schiacciamento di arti in caso di movimentazione dello schienale e dell'appoggia gambe);
 - ☞ I bambini si trovano in una stanza incustodita con il letto di cura.
- Non oscillate l'alza-malati al di fuori del letto, per evitare il pericolo che il letto si rovesci tirando l'alza-malati. Il perno di metallo dell'alza-malati deve sempre trovarsi all'interno dell'intercapedine.
- Verificate la stabilità tirando la maniglia verso il basso. L'altezza della maniglia può essere regolata per mezzo della cintura. Assicuratevi che la cintura sia inserita correttamente nel fermo.
- Movimentare le sponde una dopo l'altra attraverso i pulsanti sulle testate, accompagnandone lentamente il movimento, finché non si inseriscono automaticamente nella posizione desiderata in entrambe le estremità. Non deve essere possibile uno scorrimento verso l'alto o verso il basso. Verificate il corretto incastro premendo dalla parte alta della sponda.



Le regolazioni possono essere eseguite solo da personale esperto o in presenza di personale esperto! Verificare che la superficie d'appoggio sia completamente piatta e liscia.

Collegate il letto direttamente alla presa di corrente. Non utilizzate prolunghe e/o prese multiple.

Non applicate prese di corrente multiple sotto al letto (pericolo di incendio in caso di contatto con liquidi).

Assicuratevi che anche in caso di applicazione di accessori (per esempio compressori per sistemi di deposito, ecc.) sia garantito il corretto fissaggio e funzionamento di tutti i dispositivi. In caso di utilizzo di componenti elettrici esterni, come per esempio alza-malati, luci di lettura o compressori per sistemi di deposito, assicuratevi che il cavo di alimentazione non si impigli nelle parti mobili del letto o che non venga danneggiato.

In caso di dubbi rivolgetevi al costruttore degli accessori oppure a **Termigea**.

Non fumate nel letto, in quanto non è garantita nessuna resistenza contro utensili da fumatore a seconda dei materassi e della biancheria utilizzata.

Come ogni apparecchio elettrico, nonostante il rispetto di tutti i valori limite prescritti, non possono essere assolutamente escluse interferenze da parte di altri dispositivi elettrici che si trovano nelle vicinanze (per es. "fruscio" della radio).

In questi rari casi aumentate la distanza dall'apparecchio, non utilizzate la stessa presa oppure disconnettete temporaneamente l'apparecchio che disturba/disturbato.

In caso di pazienti particolarmente magri ed esili è eventualmente necessaria una ulteriore protezione per ridurre la distanza tra le barre delle sponde. Utilizzate per es. imbottiture, cinghie, ecc. Solo così viene garantito un funzionamento sicuro e viene ridotto al minimo il pericolo che il paziente rimanga incastrato e scivoli giù.

Se vengono utilizzati sistemi di degenza sollevati, come per esempio materassi antidecubito, deve essere garantita un'altezza delle sponde di almeno 22 cm al di sopra del materasso non sottoposto a sollecitazione. Se ciò non è possibile, devono essere prese misure adeguate a protezione del paziente.



6. Pulizia e manutenzione

Si raccomanda una pulizia regolare. Per la struttura serve semplicemente un panno morbido, inumidito con acqua ed un detersivo non abrasivo. Togliete la spina di alimentazione dalla presa e assicuratevi che non venga in contatto con acqua o disinfettante. Con cera di automobile o lucido per mobili potrete mantenere a lungo il letto. Non utilizzare getti d'acqua diretti ed in ogni caso aspettare che il letto sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

Il letto è pensato per una manutenzione minima; comunque, un controllo ogni sei mesi e la lubrificazione dovrebbero assicurarne l'ottima durata. In particolare occorre lubrificare tutti i perni con olio.

Le ruote devono rotolare e girare liberamente. Un grasso leggero a tenuta d'acqua (come il lubrificante per automobile) dovrebbe essere applicato all'attacco delle ruote.

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari, il contatto con ambienti salini, il deposito in ambienti molto umidi.

- Gli elementi meccanici di fissaggio al telaio del letto e alle sponde devono essere regolarmente controllati per verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti. Ciò deve avvenire non solo prima di applicare le sponde, ma anche durante l'utilizzo in brevi intervalli (almeno prima di ogni nuovo utilizzo).
- Controllare periodicamente che siano ben inserite testiera e pediera.
- Se necessaria la disinfezione, usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali.
- Controllare annualmente il corretto serraggio della bulloneria.
- Controllare annualmente l'usura della maniglia. In caso di normale utilizzo la durata è di almeno cinque anni. Successivamente deve essere eseguito un controllo visivo per verificare se è possibile un ulteriore utilizzo.
- Lubrificare il vitone almeno ogni due anni.

Se sospettate la presenza di un danneggiamento o malfunzionamento, disattivate il letto: togliete immediatamente la spina di alimentazione dalla presa e contrassegnate il letto in modo chiaro come "NON UTILIZZARE – PERICOLO MALFUNZIONAMENTI";

7. Deposito

Immagazzinate il letto in un posto asciutto e protetto dalla polvere.

8. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Essendo regolabile elettricamente, questo letto viene classificato come apparecchio elettrico di uso industriale secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2002/96/CE. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

9. Dichiarazione di Conformità per il Dispositivo Medico

ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE, così come emendata dalla Direttiva 2007/47/CE come prescritto dall'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti.



La scrivente **Termigea S.r.l.** con Sede in Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI) - Italia, fabbricante del dispositivo medico denominato

**“LETTI DA DEGENZA ELETTRICI SMONTABILI A TRE SNODI CON RUOTE
LE1 – LE2”**

dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi di cui all'oggetto soddisfano tutti i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE.

A tale scopo garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. Che i dispositivi in oggetto soddisfano le disposizioni applicabili della Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e dei relativi recepimenti italiani.
2. Che i **dispositivi** in oggetto sono da considerarsi come **appartenenti alla Classe I** delle Direttive suddette.
3. Che i dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE.
4. Che si impegna conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo il Fascicolo Tecnico di prodotto, specificato all'Allegato VII della Direttiva 93/42/CEE di riferimento, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di immissione in commercio dell'ultimo lotto o matricola di dispositivi indicati.
5. Che i dispositivi sono progettati, fabbricati e posti in commercio secondo quanto dichiarato nel fascicolo tecnico di prodotto.
6. Che **Termigea S.r.l.** ha già provveduto a notificare all'Autorità Competente Italiana la messa in commercio dei dispositivi succitati. Dichiara inoltre di avere istituito e di mantenere un'adeguata procedura per garantire la sorveglianza post-vendita richiesta dalla Direttiva 93/42/CEE, emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e dai relativi recepimenti italiani.

Il contenuto della presente dichiarazione di conformità viene confermato ad ogni rilascio di lotto o matricola di dispositivi indicati, prodotti a partire dal 21/03/2010.

Allegati: Copia Etichettatura / Scheda Tecnica.

Data di emissione della dichiarazione: 21/10/2014

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della marcatura di cui alla presente dichiarazione, si prega di contattare il n° telefonico +39 050 878741 o indirizzo e-mail info@termigea.it.

In fede
Termigea S.r.l.
Il legale rappresentante
Massimo Bellomini

10. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

10.1. Oggetto

Termigea S.r.l., Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI), Italia ("Termigea"), garantisce i propri prodotti contro ogni difetto di fabbricazione e contro ogni difetto di conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di vendita e/o nelle "Istruzioni d'uso e manutenzione" del singolo prodotto.

I difetti coperti dalla presente garanzia sono esclusivamente quelli già presenti al momento della consegna del prodotto.

10.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre i difetti sopravvenuti successivamente alla consegna, né i difetti già evidenti o rilevabili al momento dell'acquisto con l'uso della normale diligenza.

La presente garanzia non copre altresì i difetti derivanti da:

- normale usura;
- montaggio imperfetto o errato per mancato rispetto o non corretta esecuzione delle apposite Istruzioni.
- impropria manutenzione, non conforme alle istruzioni fornite da Termigea e allegate alla presente garanzia.
- danni o deterioramento della superficie esterna, finitura o apparenza estetica del prodotto per impropria manutenzione o lavaggio (ad. es. con alcool, solventi chimici, strumenti abrasivi o comunque in modo non conforme a quanto prescritto nelle apposite istruzioni);
- manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio del prodotto;
- danni causati da colpi, urti, incidenti;
- danni causati da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo;
- danni causati da incidenti nella fase di spedizione o trasporto, incluso lo smarrimento del prodotto.

L'acquirente non ha diritto alle prestazioni di cui alla presente garanzia nel caso in cui il prodotto sia stato riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche e alterazioni siano state espressamente autorizzate per iscritto da Termigea.

Sono a carico dell'acquirente:

- le spese di trasporto del prodotto da/a un rivenditore autorizzato
- i costi di manodopera necessari per disinstallare il prodotto e/o sue componenti.

Non sono altresì coperti dalla presente garanzia i danni per il mancato utilizzo del prodotto durante il periodo necessario per la riparazione o la sostituzione.

Il prodotto oggetto della presente garanzia (o parti dello stesso) non sarà mai considerato "difettoso" per gli effetti della presente garanzia qualora esso (o sue parti) si discordi dai livelli qualitativi/tecnici resi standard da normativa entrata in vigore successivamente alla data di acquisto, o comunque stabiliti da normativa in qualsiasi tempo in vigore al di fuori del territorio italiano. Pertanto, eventuali adattamenti, cambiamenti o regolazioni da apportarsi per conformare il prodotto (o sue parti) a tali livelli qualitativi/tecnici non sono compresi nella presente garanzia.

10.3. Prestazioni oggetto della garanzia

Il prodotto riconosciuto difettoso da Termigea verrà riparato o sostituito a discrezione di Termigea a titolo gratuito entro 30 gg lavorativi (salvo ritardi imputabili ai fornitori) dalla data di ricevimento della merce. In nessun caso sarà riconosciuta all'acquirente una riduzione del prezzo d'acquisto.

L'esecuzione di qualsiasi servizio di riparazione o sostituzione in virtù della presente garanzia non costituisce ammissione o accettazione della non conformità del prodotto o della responsabilità di Termigea in merito al difetto riscontrato.

10.4. Procedura

Qualora l'acquirente riscontri un difetto del prodotto coperto dalla presente garanzia, per ottenere le prestazioni previste a carico di Termigea, è tenuto a restituire il prodotto difettoso al proprio negoziante.

Il prodotto difettoso dovrà essere restituito nel proprio imballaggio originale accompagnato dall'apposito "Modulo di reso" debitamente compilato e controfirmato oltre che dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto e la data d'acquisto al dettaglio.

Il materiale va spedito in porto franco (il pagamento del trasporto è a carico del mittente), salvo diversa indicazione a: **Termigea srl Via Aldrovandi, 1/a – Località Ospedaletto – 56121 Pisa (PI).**

Termigea ha diritto di rifiutarsi di adempiere le obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni presenti sui documenti comprovanti l'acquisto sono state alterate o cancellate dopo l'acquisto da parte dell'acquirente, o mancano nel momento della richiesta della riparazione/sostituzione. Il materiale non correttamente imballato o con imballo danneggiato sarà respinto al mittente.

Qualora il prodotto di cui si chiede la riparazione o sostituzione non presenti alcun difetto, le spese di controllo, di intervento e di spedizione saranno a carico dell'acquirente.

Termigea declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti o smarrimenti della merce spedita o resa al cliente.

10.5. Termini

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti manifestati entro e non oltre il termine di due (2) anni dalla data di consegna del prodotto per le parti elettriche e di anni (1) per le parti meccaniche (quale risulta dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto o dalla bolla di consegna, se posteriore). L'acquirente decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia il difetto del prodotto entro il termine di trenta (30) giorni dalla data

10.6. Estensione territoriale

La presente garanzia copre i difetti dei prodotti Termigea venduti/acquistati in tutto il mondo.

10.7. Esclusività e prevalenza

La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia, dichiarazione o impegno resi per iscritto o oralmente da Termigea, e regola per intero l'impegno di Termigea nei confronti dell'acquirente di sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul prodotto, qualora il medesimo presenti difetti coperti dalla presente garanzia.

10.8. Divieto di cessione

La presente garanzia viene offerta unicamente all'acquirente del prodotto e non è estensibile a terzi. I diritti dell'acquirente in virtù della presente garanzia non sono cedibili.

10.9. Modifiche

Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente di Termigea è autorizzato a modificare, estendere o ampliare le condizioni e i termini di cui alla presente garanzia.

10.10. Legislazione applicabile e foro di competenza

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Eventuali controversie relative all'interpretazione, validità applicazione della presente garanzia saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pisa (PI), Italia.

10.11. Avvertenza

Si raccomanda di effettuare tutte le procedure di installazione, uso e manutenzione seguendo scrupolosamente le istruzioni del prodotto ivi contenute.



11. Modulo di reso

Data ____/____/____

Cliente: _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____

Telefono: _____ email: _____

Codice Prodotto: _____ N° Fattura _____ Data Fattura _____

Descrizione dettagliata del difetto / Motivo del reso
.....
.....
.....
.....
.....

Firma leggibile del Cliente

Riservato a Termigea srl

Reso n° del _____ Firma dell'incaricato per accettazione delle condizioni di garanzia